

Covid19-Selbsttest zum Gurgeln mit PCR-Laborauswertung und Testbescheinigung

**VORFRANKIERTES RÜCKSENDESET
MIT MEDIZINISCHER PCR-TESTBESCHEINIGUNG PER APP**



- Covid 19 – einfach und sicher selbst testen
- Kein schmerzhafter Rachenabstrich notwendig
- Kein medizinisches Vorwissen nötig
- Verlässliches, präzises PCR-Testverfahren
- Schnelle PCR-Laborauswertung per App und PDF
- Anerkannter PCR-Test für Reisen
- Anerkannte medizinische PCR-Testbescheinigung
- Effiziente, kostengünstige Pooltests für Gruppen

Das PCR-Labor in Ihrem Briefkasten

Mit unserem **Rücksendeset** können sie leicht eine **Rachenflora-Probe** zu Hause entnehmen und an uns zurückschicken. In Ihrem Auftrag wird diese im **akkreditierten Fachlabor** mit der zurzeit genauesten verfügbaren Methode, der **PCR-Laboruntersuchung** analysiert. Unser stetig wachsender Leistungskatalog bietet die PCR-Laboruntersuchung SARS-CoV-2 separat oder im Komplettpaket.

Das **Rachenflora-Rücksendeset** für zu Hause besteht aus einer wässrigen Salzlösung, einem Probenröhrchen, einer einfachen, deutschsprachigen Gebrauchsanweisung, einem QR-Code und einer vorfrankierten Rücksendeverpackung.

Sie schicken die entnommene Probe an uns, buchen mit dem QR-Code den Labortest bei unserem Fachlabor und **innerhalb von 12-24 Stunden** nach Probeneingang erhalten Sie das Ergebnis in der Befundungs-App auf deutsch und englisch.

Die hohe Effizienz der PCR-Tests erlaubt es Proben in **Patientenpools** zu vereinigen. Dies bietet sich insbesondere für **Unternehmen, Schulen oder Kitas** an.

Wir informieren Sie gerne über unsere Pool-Tests und machen **Ihnen ein persönliches Angebot per Email: info@hanse-scientific.de**

Handhabung des Tests und Ablauf der Auswertung




1. Covid19-Infektionsverdacht nach positiven Kontakten oder PCR-Test für Reisen?




2. Kein schmerzhafter Abstrich, keine Kontakte in der Arzt-Praxis oder im Impfzentrum



3. Rücksendeset für die Rachenflora bestellen und zuschicken lassen.

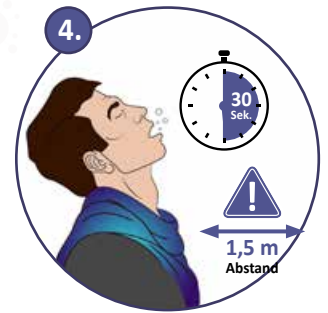

4. Einfach 30 Sekunden gurgeln, und in das Probenröhrchen füllen. 1,5 m Abstand halten!

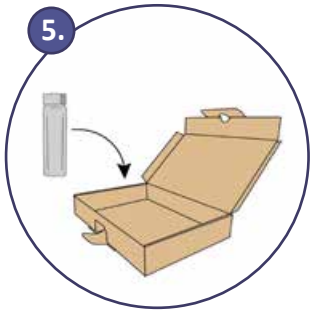

5. Versiegelte Rachenflora-Probe im vorfrankierten Rücksendeset verpacken.




6. Per DHL verschicken und online den Aktivierungscode dazu buchen.



7. Ihre Probe wird im Labor mit dem genauesten PCR-Testverfahren ausgewertet.



8. Nach 12-24 Std. liegt ihr Ergebnis in der App und als PDF vor (deutsch & englisch).

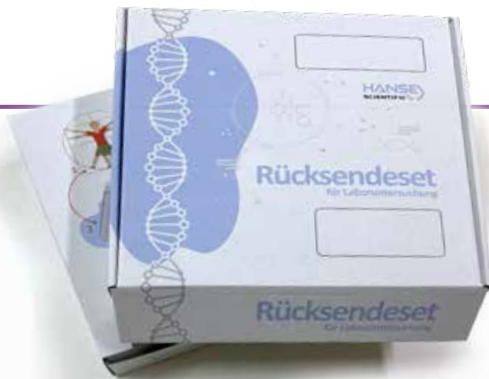

Vorteile des Covid19-Selbsttests mit medizinischer PCR-Testbescheinigung


- PCR-Tests sind die sichersten und sensitivsten Covid 19-Testverfahren und sind deshalb bei vielen Reisen und beim Fliegen erforderlich.
- Das Rücksendeset für die Rachenflora kann einfach zu Hause oder am Arbeitsplatz verwendet werden.
- Dieser Vorgang kann ohne medizinisches Vorwissen auch von Laien durchgeführt werden.
- Das Gurgelverfahren ist absolut schmerzfrei und einfach durchzuführen.
- Für die Probenentnahme benötigen Sie keinen Termin und vermeiden Kontakte in vollen Wartezimmern oder in einem Testzentrum.
- Buchen Sie die PCR-Laboraauswertung ganz einfach mit dem QR-Aktivierungscode hinzu.
- Die Probe wird einfach in der vorfrankierten Rücksendebox mit DHL verschickt, Expressversand kann für 11€ pro Versandrichtung zusätzlich gebucht werden. Die Zustellung erfolgt am Folgetag.
- Das Ergebnis bekommen sie schnellstmöglich digital in einer App und als PDF 12-24 Stunden nach Probeneingang in deutsch und englisch.
- Kostengünstiger als übliche PCR-Tests: Den Gurgeltest bevorraten Sie griffbereit in ihrer Hausapotheke und buchen und bezahlen den Aktivierungscode für den PCR Labortest nur im Anwendungsfall – Zum Beispiel vor einer Reise.
- Kostengünstige Pooltest-Sets für Gruppen erhältlich für effiziente Gruppentestungen.

POOLTESTS – Unser Vorteils-Angebot für Firmen, Schulen, Kitas und private Gruppen

Durch das Poolen der Proben können wir die hocheffiziente PCR-Untersuchung zu wesentlich geringeren Preisen anbieten.

Die Proben werden vereinigt und mittels RT-PCR-Test untersucht. Da das PCR-Verfahren schon wenige Viruskopien in der Probe erkennt, kann trotz der Pool-Bildung höchste Sensitivität gewährleistet werden. Falls der Pooltest negativ ist, sind alle Patienten als negativ anzusehen; falls der Test positiv ausfällt, wird jede Probe einzeln untersucht, um die positive Probe zu identifizieren.

Prinzip der Pool-Methode:

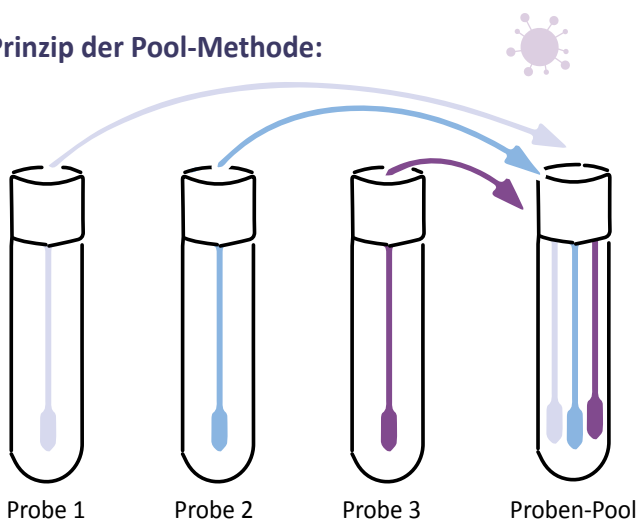

Vorteile der Pooltests

- Sicherheit für die Mitarbeiter und eine willkommene Bonusleistung, denn die Testbescheinigung kann auch für Freizeitveranstaltungen verwendet werden.
- Sicherheit für Außendienst-Mitarbeiter, die Außenkontakte mit Unternehmenskunden haben.
- Infektionen können bei geringen Viruslasten erkannt werden, bevor die Person ansteckend wird. Dadurch werden Ausbrüche effektiv vermieden.
- Das bewährte PCR-Verfahren minimiert die Gefahr von falsch positiven Ergebnissen. Bei einem falsch positiven Schnelltest müssen die Betroffenen in Quarantäne, was zu unnötigem Arbeitsausfall führt.
- Keine zusätzlichen Kosten bei einem positiven Pool Test. Nach der Auflösung Einzeltest-Resultate für alle getesteten Personen.
- Veranstaltungen für Mitarbeiter oder Schüler werden wieder möglich; mit der PCR Untersuchung ist für Sicherheit gesorgt.
- Auch für Kleinkinder, Kita-Gruppen oder für die Grundschule geeignet: Hier kann das sogenannte Lolli-Verfahren angewendet werden. Dabei müssen die Kinder zur Probenentnahme an einem Stäbchen mit saugfähigem Material lutschen. Auch hier können die Proben für die ganze Klasse oder Gruppe in einem Pool vereinigt werden.

Optionales Lolli-Besteck

Für kleine Kinder,
die noch nicht gurgeln können.

Fragen Sie uns nach einem Angebot
für ihre Gruppe oder Klasse.



PREISE FÜR POOLTESTS

Das Diagramm zeigt vier Preise für Pooltests in verschiedenen Größen, jeweils in einem Kreis dargestellt. Über dem Diagramm sind Symbole für ein Laborkasten, ein Mikroskop und ein Smartphone zu sehen.

Größe	Preis (UVP inkl. MwSt.)
5-er Pool-Test	159,95 €
10-er Pool-Test	219,95 €
15-er Pool-Test	249,95 €
20-er Pool-Test	279,95 €

Rücksendeset

+ PCR Laboruntersuchung SARS-CoV-2

Komplettpaket aus 1+2 in div. Größen

Vorfrankiertes Rücksendeset für Gurgel-Probe mit Aktivierungscode, den Sie in den Laborauftrag eintragen. Die Proben werden vereinigt und mittels RT-PCR untersucht. Falls der Pooltest negativ ist, sind alle Patienten als negativ anzusehen. Im Fall, dass der Test positiv ist, wird jede Probe einzeln untersucht, um die positive Probe zu identifizieren. Das PCR-Ergebnis bekommen Sie digital 12-24 Stunden nach Probeneingang in deutsch und englisch.

Preis pro Test

5-er Pool-Test: 32 € pro Test
10-er Pool-Test: 22 € pro Test
15-er Pool-Test: 17 € pro Test
20-er Pool-Test: 14 € pro Test

INHALT für jeden Testteilnehmer:

- 1x Salzlösung zum Gurgeln
- 1x Aufnahmebehältnis
- 1x Ansaugstutzen
- Optional: Lolli-Besteck für kleine Kinder
- 1x Ausführliche deutschsprachige Gebrauchsanweisung
- 1x Vorfrankierte Rücksendeverpackung
- 1x QR Code für digitale Befundübermittlung
- 1x Zeitlich unbegrenzt gültiger Aktivierungscode für SARS-CoV-2 (Covid19) PCR-Labortest

Die Kosten für eine eventuelle Auflösung des Pools sind bereits im Preis enthalten.

Fragen Sie uns nach
einem individuellen
Pooltest-Angebot!



UVP inkl. MwSt.
19,95 €

Rücksendeset für Laboruntersuchung

Nur Entnahmeset.

Unser vorfrankiertes Rücksendeset ist ideal für die einfache Probeentnahme einer Rachenflora-Probe zu Hause, da die Probe auch von Laien durch Gurgeln gewonnen werden kann. Die PCR-Laboruntersuchung aktivieren und bezahlen Sie erst später mit dem beiliegenden QR-Code.

INHALT:

- 1x Salzlösung zum Gurgeln
- 1x Aufnahmebehältnis
- 1x Ansaugstutzen
- 1x Ausführliche deutschsprachige Gebrauchsanweisung
- 1x Vorfrankierte Rücksendeverpackung
- 1x QR Code für Buchung und schnelle digitale Befundübermittlung



UVP inkl. MwSt.
108,05 €

PCR-Laboruntersuchung SARS-CoV-2

Nur Laborauswertung.

Der PCR-Test ist das derzeit sensitivste Testverfahren für Covid 19 Erreger und wird in einem deutschen, akkreditierten Fachlabor für Humandiagnostik durchgeführt.

Wenn Sie das Rücksendeset mit der entnommenen Gurgel-Probe einsenden möchten, buchen Sie den Aktivierungscode,

den Sie in den Laborauftrag eintragen. Ihre Testbescheinigung bekommen Sie digital 12 - 24 Std. nach Probeneingang in deutsch und englisch.

INHALT:

- 1x Zeitlich unbegrenzt gültiger Aktivierungscode für SARS-CoV-2 (Covid19) PCR-Labortest mit digitaler Befundübermittlung



UVP inkl. MwSt.
128,00 €

Rücksendeset

+ PCR Laboruntersuchung SARS-CoV-2

Komplettpaket aus 1+2

Vorfrankiertes Rücksendeset für Gurgel-Probe mit Aktivierungscode, den Sie in den Laborauftrag eintragen. Das PCR-Ergebnis bekommen Sie digital 12-24 Std. nach Probeneingang in deutsch und englisch.

INHALT:

- 1x Salzlösung zum Gurgeln
- 1x Aufnahmebehältnis
- 1x Ansaugstutzen
- 1x Ausführliche deutschsprachige Gebrauchsanweisung
- 1x Vorfrankierte Rücksendeverpackung
- 1x QR Code für digitale Befundübermittlung
- 1x Zeitlich unbegrenzt gültiger Aktivierungscode für SARS-CoV-2 (Covid19) PCR-Labortest

Fragen & Antworten

Kann ich ein negatives Ergebnis bekommen, obwohl ich infiziert bin?

Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit kann das vorkommen, wie bei allen molekularbiologischen Tests. Laut Robert-Koch-Institut gibt es dafür verschiedene Gründe. Die häufigsten sind:

Testdurchführung: Bei einem Rachenabstrich wird dieser nicht an der richtigen Stelle gewonnen. Diese Unsicherheit wird durch das Gurgelverfahren minimiert.

Zeitpunkt: SARS-CoV-2 hat in der ersten Erkrankungswoche im Rachenraum die höchste Viruskonzentration. In einigen Fällen können die Viren in der zweiten Woche der Erkrankung in die Lunge wandern. Das bedeutet, dass die für einen Test nötige Virusmenge im Rachen unter der Nachweisgrenze liegen kann.

Wie zuverlässig ist das Gurgeln im Vergleich zum Abstrich?

Die Probenentnahme durch Gurgeln ist ähnlich zuverlässig ist wie der Abstrich. Der größte Vorteil der Gurgellösung: Die Durchführung des Tests muss nicht durch das ohnehin schon überlastete medizinische Personal unter strengen Schutzmaßnahmen erfolgen, sondern kann von auch von Laien zu Hause ohne weitere Kontakte durchgeführt werden.

Wie erhalte ich einen schriftlichen Befund?

Der Schnellbefund wird nach Eingabe Ihrer persönlichen Kennung direkt in der App angezeigt und kann als PDF-Datei auf deutsch und englisch heruntergeladen und dann ausgedruckt werden.

Was kostet der Versand?

Der Standard Postversand ist im Preis enthalten. Wenn Sie einen Expressversand wünschen, können Sie diesen für 22 € bei der Onlinebestellung dazu buchen. Beim DHL Expressversand wird Ihr Paket am kommenden Tag bis zehn Uhr zugestellt.

Was passiert mit Ihren Kundendaten?

Ihre Daten werden nur im Rahmen ihres Auftrags verarbeitet und nicht weiter gegeben. Sie erklären sich gemäß der AGB damit einverstanden, dass diese Daten in Papierform auf dem von Ihnen ausgefüllten Laborauftrag samt der Probe an das Fachlabor übermittelt werden. Diese Daten werden zweckbestimmt für die Befundübermittlung genutzt und selbstverständlich Datenschutzkonform behandelt.